


Informatie Wheely-zithoes

Gebruiksaanwijzing:

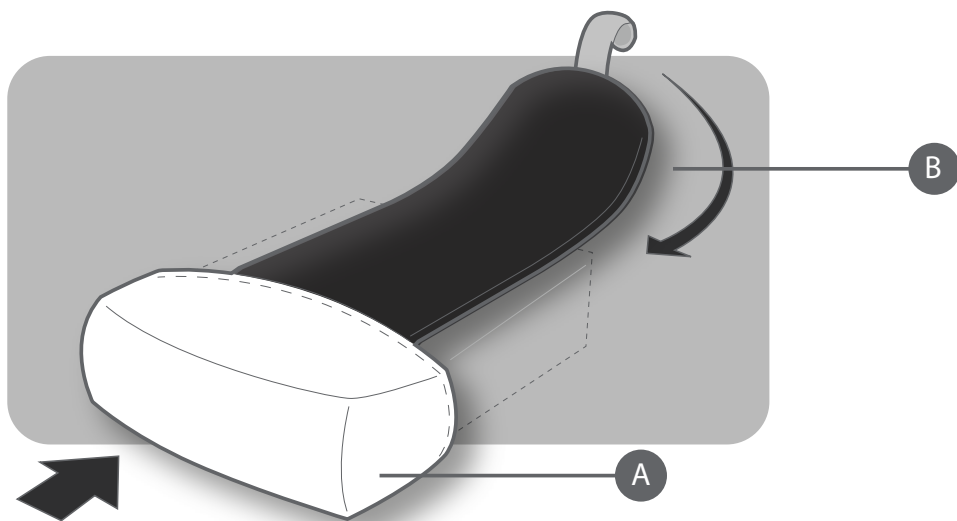

Schuif de voorzijde van de zithoes over de voorkant van het zitkussen of de zitting (A)

Sluit aan de onderzijde het klittenband en leg je kussen terug in de rolstoel (B)

Modelinformatie:

De Wheely-zithoes is te koop in verschillende maten. De hoes kan ook om de zitting van de rolstoel worden geschoven (als je een rolstoel zonder kussen hebt). Klap de zitting deels in en schuif de hoes om de zitting heen.

De Wheely-zithoes is verkrijgbaar in de volgende maten:

S	30-35 cm breed (±5 cm dik)
M	36-43 cm breed (±5 cm dik)
L	44-50 cm breed (±5 cm dik)

Wasinstructie:


Was het model bij voorkeur met de hand. Niet in de droger. Liggend laten drogen. Geen chloor gebruiken!



Verschillende dessins te koop....

Door elastiek verschillende diktematen mogelijk....

Ademende zwarte stof, met antislip bolletjes waardoor zithoes op zijn plaats blijft zitten....

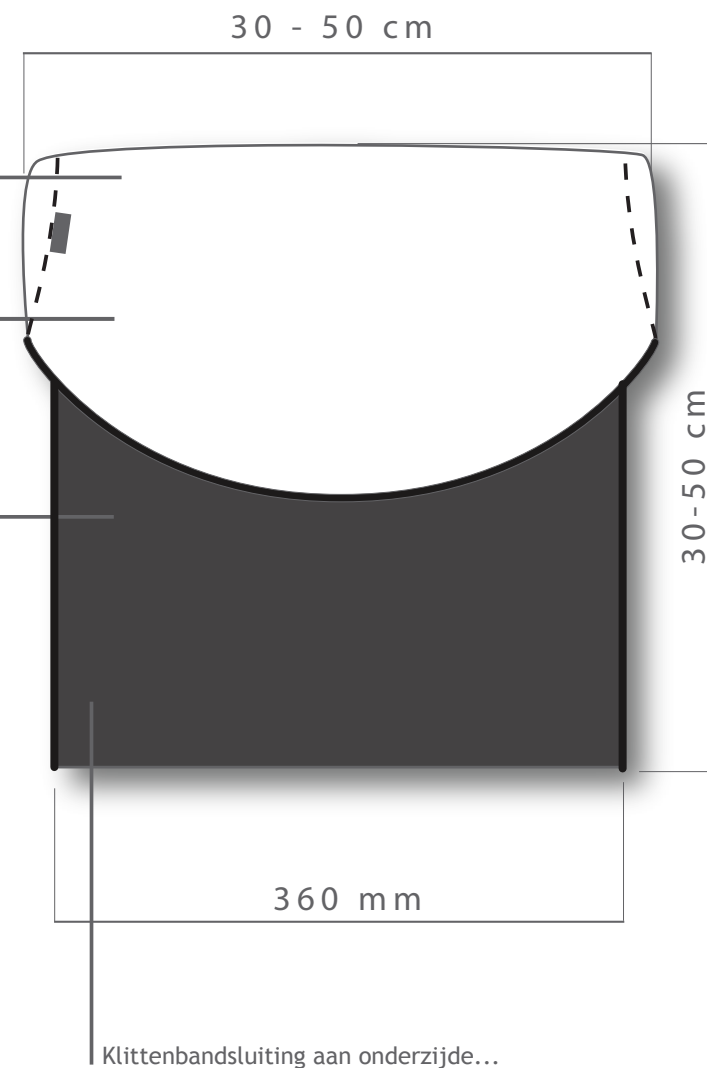

Klittenbandsluiting aan onderzijde...

PimpedbyRuus